


## Wie Sie MetaSoft®-Studio auch im Home-Office nutzen können!


In diesem Dokument wird Ihnen schrittweise beschrieben, wie Sie einen temporären Studentenzugang in der CORTEX MetaSoft®-Studio - Demoversion einrichten können. Diese Vorgehensweise ermöglicht Ihnen Testdaten zu importieren, mit denen Sie auch in einer Home-Office-Situation arbeiten können. Diese Option ist zeitlich bis Ende dieses Jahres begrenzt (12/2020).


1. Installieren Sie die aktuelle MetaSoft®-Studio Software Version 5.11 in der Standard-Option (Single PC).
2. Führen Sie nach Abschluss der Installation die Anwendung »MSS TOOLBOX« aus.
3. Bestätigen Sie in dem angezeigten Dialogfenster den »DEMO-Modus« mit der Schaltfläche »JA«.




4. Wählen Sie im Login-Fenster den Bediener ADMINISTRATOR aus und klicken Sie anschließend auf »OK«. Die Eingabe eines Passwortes ist nicht notwendig.

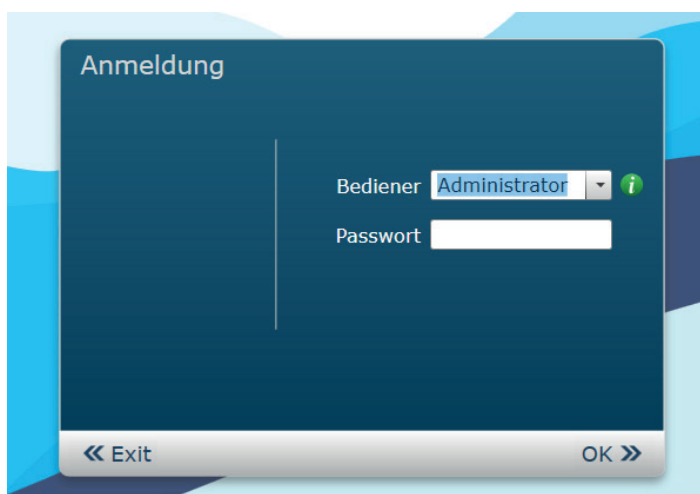

5. Wählen Sie nun unter dem Menüpunkt NUTZERDATEN die Rubrik »BEDIENER-/GRUPPENVERWALTUNG« aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche  und fügen Sie einen Bediener zu der bereits vorhandenen INSTITUTION hinzu.
7. Hinterlegen Sie in dem Eingabefeld »ANMELDE-NAME« den Namen »EDUCATION«. Es empfiehlt sich ebenfalls alle anderen Eingabefelder ordnungsgemäß auszufüllen.

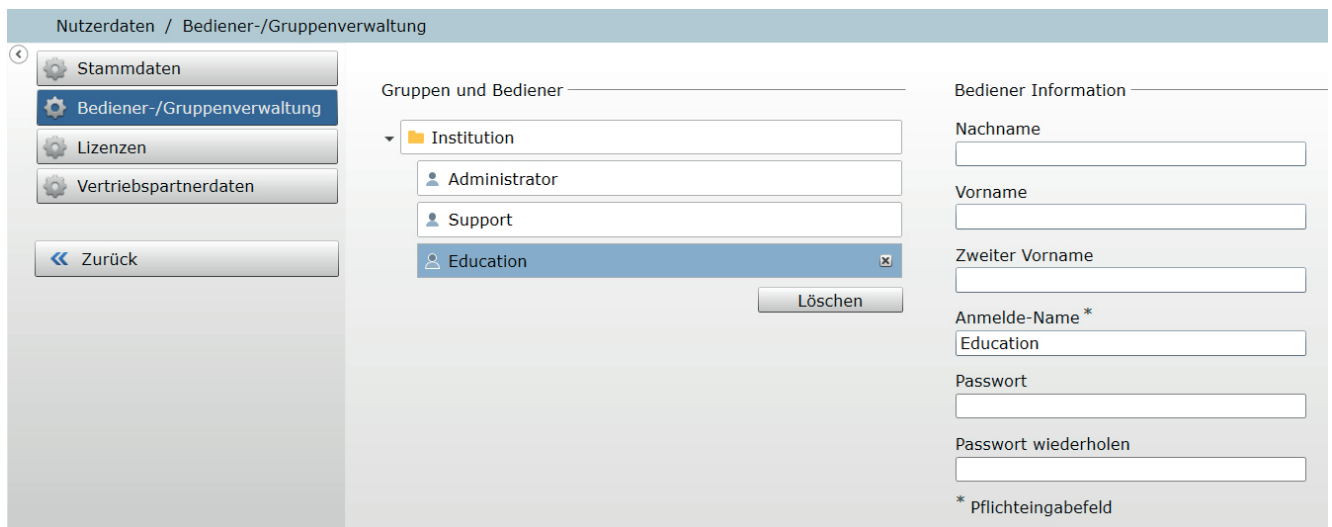


8. Wählen Sie die nachfolgend abgebildeten BERECHTIGUNGEN UND VERANTWORTLICHKEITEN aus.

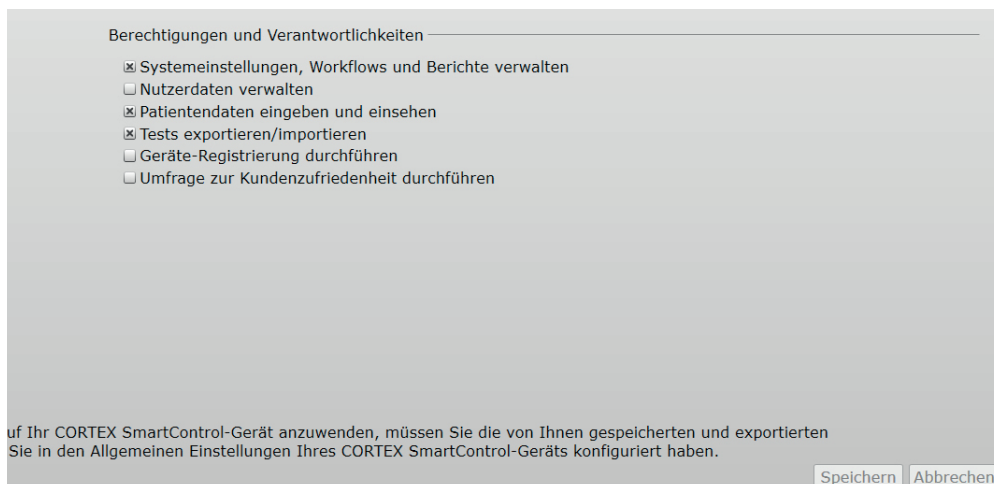

9. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche »SPEICHERN« und beenden Sie die Anwendung »MSS TOOLBOX«.
10. Öffnen Sie die Anwendung »MSS TOOLBOX« erneut und wählen Sie im Login-Fenster den Bediener „EDUCATION“ aus.

11. Wählen Sie in dem Hauptmenü die Rubrik »DATENBANK« aus.

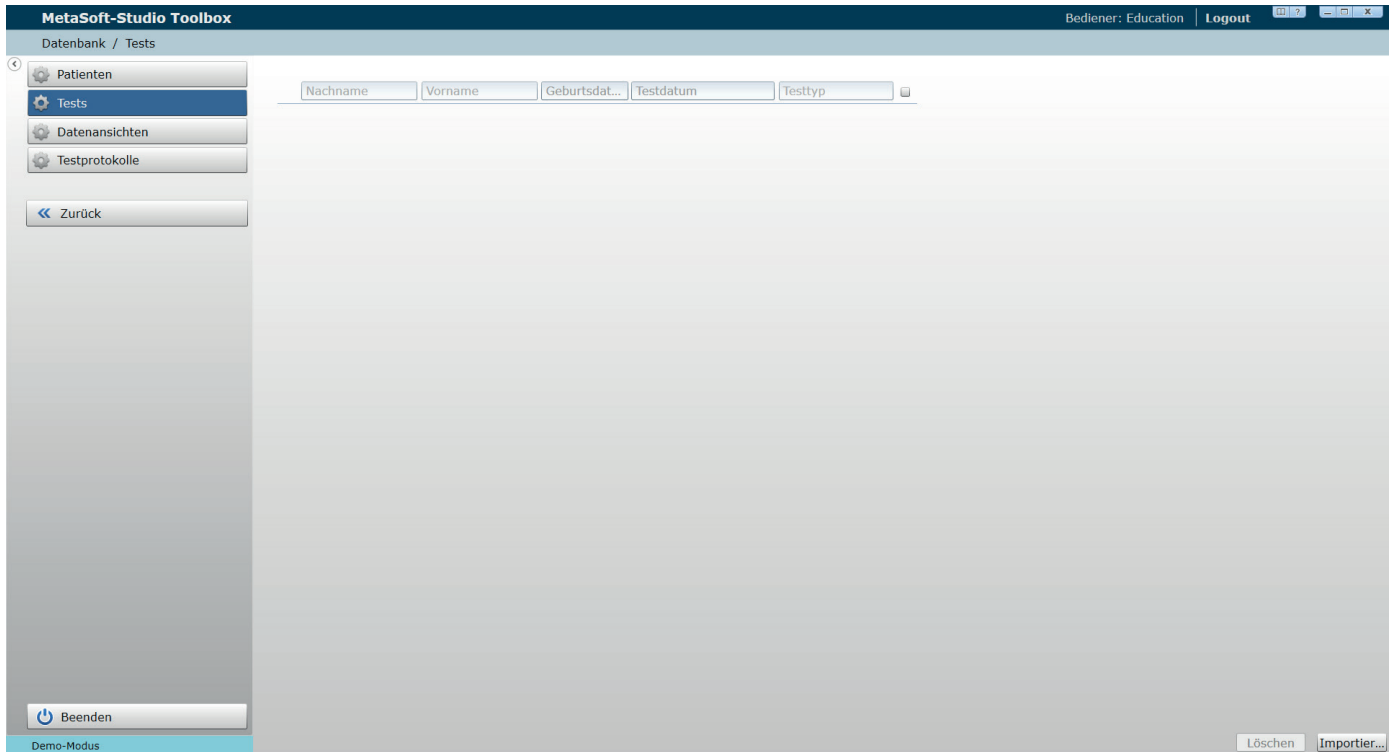

12. Klicken auf den Unterpunkt »TESTS« und importieren Sie die gewünschten Testdaten (mit der Dateierweiterung \*.msstest) mit Hilfe der Schaltfläche »IMPORTIEREN«.

13. Beenden Sie die Anwendung »MSS TOOLBOX« und starten Sie »METASOFT-STUDIO«. Ihnen sollten nun die zuvor ausgewählten Testdaten zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen.